

PROCULIN LENS travel pack (putno pakiranje)

Višenamjenska otopina s hijaluronskom kiselinom. Dezinficira, čuva, čisti, hidrira, podmazuje, ispire, vlaži, uklanja naslage proteina. Za sve vrste kontaktnih leća. Pogodno za osjetljive oči. **Sadrži kutiju za leće.**

NAMJENA PROIZVODA

Višenamjenska otopina za dezinfekciju, čuvanje, čišćenje, vlaženje, podmazivanje, ispiranje i uklanjanje naslaga proteina za sve vrste kontaktnih leća, uključujući i leće od silikon hidrogela. Namijenjeno korisnicima s osjetljivim očima sklonima sindromu suhog oka. Uključena je kutija za leće s ionima srebra.

Zahvaljujući hijaluronskoj kiselini, proizvod podmazuje kontaktne leće, što poboljšava udobnost pri dugotrajnom nošenju.

UPUTE ZA UPORABU

Pažljivo operite i osušite ruke.

Izvadite leću, stavite je na dlan, stavite nekoliko kapi otopine i protrljajte površinu leće.

Ispirajte leću otopinom da uklonite sve ostatke.

Stavite leće u kutiju i napunite je tekućinom.

Za dezinfekciju ostavite leće u otopini najmanje 4 sata, ili još bolje tijekom cijele noći.

Lagano otresite kutiju prije nego izvadite leće.

Leće su spremne za uporabu.

Bacite iskorištenu otopinu i zatvorite kutiju za leće.

UPOZORENJA



Proizvod je sterilan do prvog otvaranja bočice; Dobro zatvorite bočicu nakon uporabe; Upotrijebite proizvod unutar 90 dana od prvog otvaranja; Proizvod ne zamrzavati i držati dalje od izvora topline; Čuvati izvan dohvata djece; Ne smije se progutati; Nemojte koristiti proizvod u slučaju preosjetljivosti na bilo koji sastojak; U slučaju štetnih događaja prekinuti korištenje i obavijestiti liječnika.

SASTAV

Izotonična sterilna otopina sa pH 7,2 sadrži: poliheksametilen bigvanid (PHMB) (0,0001 %), polikvaternium 2 (0,006%), natrijev edetat (0,1%), metilpropanediol (0,4%), poloksamer 407 (1%), natrijev hijaluronat (0,025%), citratna kiselina, natrijev citrat, natrijev klorid, pročišćena voda.

SADRŽAJ KUTIJE

1 bočica od 100 ml

1 kutija za leće

Medicinski proizvod **MD**

