

PROCULIN® SOFT LENS VIŠENAMJENSKA OTOPINA s hijaluronskom kiselinom.

Za čišćenje, uklanjanje proteinskih naslaga, dezinfekciju, ispiranje, čuvanje, stavljanje i vlaženje.

Za meke kontaktne leće.

MEDICINSKI PROIZVOD

Sastav:

Aktivni sastojak: polikvaternij, hijaluronat

Konzervans: PHMB 0,0002%

Pažljivo pročitajte upute i upozorenja radi pravilnog korištenja otopine **PROCULIN® SOFT LENS** u kombinaciji s kontaktnim lećama.

Preporučuje se za osjetljive oči

Sadrži natrijev hijaluronat koji poboljšava vlaženje leća i povećava podnošljivost nošenja leća zahvaljujući svojim viskozno-elastičnim svojstvima. Otopina vlaži leće ne samo nakon stavljanja nego i tijekom dana zahvaljujući svojem svojstvu “zaključavanju vode”. Poboljšava udobnost nošenja leća te smanjuje nadraženost očiju i suhoću.

Mjere opreza i upute za korištenje:

- Pažljivo operite ruke prije vađenja leća iz očiju ili kutijice za leće. Obrišite ruke čistim ručnikom. Zakretanjem čepa na bočici slomit će se jamstveni pečat.
- Leće odmah nakon vađenja očistite pomoću nekoliko kapi otopine **PROCULIN® SOFT LENS**. Leću stavite na dlan jedne ruke, a kažiprstom druge ruke nježno je trljajte 10 do 15 sekundi da biste je očistili.
Leće isperite otopinom **PROCULIN® SOFT LENS**.
- Da biste leće dezinficirali, stavite ih u kutijicu za leće napunjenu svježom otopinom **PROCULIN® SOFT LENS** i ostavite tako najmanje 6 sati.
Leće uklonite iz kutijice nakon ciklusa dezinficiranja, isperite ih otopinom **PROCULIN® SOFT LENS** i stavite u oči.
- Kutijicu za leće isperite otopinom **PROCULIN® SOFT LENS** i ostavite je neka se osuši na zraku.
- Nemojte dirati vrh kapaljke na bočici jer biste mogli onečistiti otopinu.
- Bočicu čvrsto zatvorite odmah nakon korištenja.

Ostale upute:

Ako su leće bile pohranjene dulje od 7 dana, potrebno ih je ponovno očistiti i dezinficirati prije nošenja.

Često mijenjajte kutijicu za leće da biste spriječili infekciju uslijed onečišćenja.

Upozorenja:

- Nemojte koristiti ako je jamstveni pečat oštećen.
- **PROCULIN® SOFT LENS** nemojte miješati ni koristiti s drugim tekućinama za kontaktne leće ako to nije navedeno u uputama za korištenje.
- Preostalu otopinu kutijici za leće uvijek zamijenite svježom.
- Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti.

- Nemojte mijenjati sustav kontaktnih leća bez savjetovanja s liječnikom / specijalistom za kontaktne leće.
- Nikada nemojte koristiti vodu iz slavine kao zamjenu za tekućinu za kontaktne leće.

Nemojte koristiti:

Ako vam je propisan lijek za oči, savjetujte se s oftalmologom ili specijalistom za kontaktne leće prije korištenja lijeka u kombinaciji s kontaktnim lećama.

U slučaju nadraženosti oka, prekinite korištenje i savjetujte se s liječnikom/specijalistom za kontaktne leće.

Čuvanje:

Čuvajte izvan dohvata djece.

Čuvajte na temperaturi od 4°C do 25°C (od 40°F do 77°F).

Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti.

Otopinu čuvajte u originalnoj ambalaži.

Iskoristite unutar 3 mjeseca od otvaranja.

Nuspojave:

PROCULIN® SOFT LENS nemojte koristiti ako ste alergični na neki od sastojaka.

Distributer za Republiku Hrvatsku:


Alkaloid d.o.o.

Slavonska avenija 6 A

10 000 Zagreb

01REF1686

03/2019

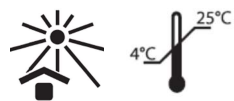

TEGE Pharma B.V.

Minervum 7384

4817 ZH Breda

The Netherlands