

PROCULIN® TEARS ADVANCE +

**Kapi za oči na bazi 0,4% umrežene hijaluronske kiseline –
u bočici od 10 ml za višestruko doziranje**

PROCULIN® TEARS ADVANCE + su sterilna otopina za oftalmološku primjenu, s fiziološkim pH, temeljena na patentiranoj tehnologiji umrežavanja hijaluronske kiseline (HA) s urejom, poboljšavajući i pojačavajući tako specifična mehanička svojstva prirodne hijaluronske kiseline; otporna je na razgradnju hijaluronidazom mnogo dulje od prirodne HA, stoga ima jači i produljeni učinak podmazivanja i hidratacije. Hidratantna mrežna struktura umrežene HA može otpuštati vodu tijekom duljeg razdoblja poboljšavajući svojstva podmazivanja prirodne HA dok istodobno pojačava njezine hidratantne učinke, stoga je indicirana kao pomoćno sredstvo kod sindroma suhog oka. Umrežena HA osigurava proizvodu svojstva podmazivanja, vlaženja i obnavljanja, pogodna za ublažavanje suhoće oka zbog sindroma suhog oka, nadraženog ili umornog oka u slučaju upalnih stanja ili vanjskih čimbenika.

Formula je razvijena kako bi pružila maksimalno olakšanje već nakon prve primjene. Prikladno za svakodnevnu primjenu, danju i noću.

Ne sadrži konzervanse i/ili molekule s protuupalnim i vazokonstriktivnim djelovanjem.

PROCULIN® TEARS ADVANCE + su pogodne za korištenje uz kontaktne leće.

NAMJENA

PROCULIN® TEARS ADVANCE + su namijenjene za:

- obnavljanje i poboljšanje stabilnosti suznog filma kod sindroma suhog oka;
- nakon refrakcijskog kirurškog zahvata;
- umiruje oči kod pojave crvenila, umora i neugode oka ili očne sluznice zbog:
 - vanjskih čimbenika (klima uređaji, prekomjerna izloženost sunčevom zračenju, vjetru, dimu, onečišćenju, dodir s morskom ili bazenskom vodom i suhom soli);
 - suhoće očiju zbog pretjeranog umora uzrokovanog dugotrajnim radom na računalu, učenjem;
 - anomalije suznog sustava kao posljedica upale, kronični blefaritis;
 - anomalije suznog sustava kao posljedica operacije oka različite prirode ili estetskog zahvata kapaka;
 - nošenja mekih ili polutvrđih kontaktnih leća.

SASTAV

Vodena otopina umreženog polimera natrijevog hijaluronata (od čega 0,4 % umreženi polimer natrijevog hijaluronata), trometamol, kloridna kiselina 2N, natrijev klorid, voda za injekcije. Bez konzervansa.

UPUTA ZA UPORABU

- Temeljito operite ruke.
- Prije prve primjene uklonite zaštitnu naljepnicu.
- Uklonite zaštitni zatvarač i otvorite bočicu.
- Okrenite bočicu prema dolje i laganim pritiskom bočice ukapajte 2 kapi u svako oko, osim ako nije drugačije propisano.
- Pričekajte nekoliko sekundi nakon svake kapi bez pritiskanja bočice. To će omogućiti da se dovoljno zraka vrati natrag u sustav sterilnog zračnog filtera, inače će kapljice teže ići van.
- Postupno pražnjenje bočice može biti povezano s potrebom za većim pritiskom kako bi se omogućila isporuka proizvoda. To se događa zbog svojstava sustava zatvaranja za očuvanje sterilnosti te kemijskih i fizičkih karakteristika otopine bez konzervansa. Mala količina otopine također uvijek ostaje u bočici.
- Nakon uporabe otresite preostalu kap s vrha.
- Nakon uporabe odmah zatvorite bočicu zatvaračem.
- Nemojte ponovno stavljati zaštitni zatvarač dok je spremnik još uvijek stisnut.
- Nemojte dodirivati vrh aplikatora ničim, uključujući oko ili prste.
- Nakon prvog otvaranja sadržaj bočice se mora iskoristiti unutar 3 mjeseca.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

- Proizvod je namijenjen isključivo za oftalmološku primjenu.
- Proizvod je namijenjen za jednoga korisnika.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod ako je pakiranje oštećeno ili primijetite da bočica nije bila dobro zatvorena prije prvog otvaranja.
- Nemojte koristiti ako u otopini primijetite vidljive čestice i/ili promjene u boji otopine.
- Tijekom primjene, nemojte dodirivati površinu oka ili bilo koju drugu površinu vrhom kapaljke bočice.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju i naljepnici.
- U slučaju pojave neželjenih učinaka, prekinite primjenu proizvoda i posavjetujte se s liječnikom.
- Nemojte koristiti u slučaju poznate preosjetljivosti na bilo koji sastojak otopine.
- Nisu zabilježene interakcije s lijekovima ili drugim kapima za oči, međutim, ostavite najmanje 15 minuta između primjene bilo kojih drugih kapi za oko.
- Bacite proizvod u skladu s lokalnim propisima za upravljanje otpadom.
- Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
- Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije upotrebe ovog proizvoda ako ste trudni ili dojite.
- Za vanjsku uporabu, ne gutati.
- Ne pokušavajte otkinuti ili rastaviti kapaljku od bočice.
- Svaki ozbiljan neželjeni učinak koji se dogodi u vezi s proizvodom potrebno je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj boravite.

NEŽELJENI UČINCI

Neposredno nakon ukapavanja može doći do pojave blagog privremenog zamućenja vida zbog viskoznosti otopine. Stoga se savjetuje pričekati nekoliko sekundi prije bilo kakve radnje za koju je potreban jasan vid.

PAKIRANJE

Pakiranje se sastoji od bočice sa zatvaračem s mehanizmom za višestruko doziranje na pritisak (OSD) s 10 ml oftalmološke otopine.

UVJETI ČUVANJA

Čuvati na temperaturi između 2°C i 30°C na suhom mjestu dalje od topline i izravne sunčeve svjetlosti. Nakon prvog otvaranja sadržaj bočice se mora iskoristiti unutar 3 mjeseca.

ROK VALJANOSTI

Neotvoreni proizvod nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i na naljepnici.



COC Farmaceutici S.r.l. Via Modena, 15
40019 Sant'Agata Bolognese (BO)
Italija



STERILE A



DT/01/DT/010

Adresa distributera:
Alkaloid d.o.o.
Slavonska avenija 6 A
10000 Zagreb, Hrvatska

Datum posljednje revizije 02.01 od 10/2022