

PROCULIN® TEARS
oftalmološka otopina za podmazivanje i vlaženje očiju
natrijev hijaluronat 0,2%
10 ml

Sastav: natrijev hijaluronat (0,2% w/v); dibazični natrijev fosfat dodekahidrat; monobazični natrijev fosfat, hidrat; natrijev klorid; natrijev edetat; benzalkonijev klorid; voda za injekcije.

ŠTO JE PROCULIN® TEARS?

PROCULIN® TEARS je sterilna otopina za oči koja sadrži natrijev hijaluronat.

KAKO PROIZVOD IZGLEDA?

PROCULIN® TEARS je otopina za oči pakirana u bočici od 10 ml.

KADA SE KORISTI PROCULIN® TEARS?

PROCULIN® TEARS je oftalmološka otopina natrijevog hijaluronata visoke molekularne mase, dobivenog biotehnoškom sintezom. Natrijev hijaluronat daje otopinama mukomimetička svojstva, s optimalnim svojstvima podmazivanja zbog viskoznosti otopina što rezultira učinkom ovlaživanja i stabilizacijom suznog filma.

Podmazujuća, ovlaživačka i zaštitna svojstva natrijeva hijaluronata ublažavaju osjećaj iritacije, suhoće ili žarenja očiju, osjećaj prisutnosti stranog tijela u očima, nastalih zbog utjecaja iz okoliša (vjetar, sunce, suhi zrak, dim), naprezanja vida (prekomjerna svjetlost i produljen rad za računalom), ili mehaničkim čimbenicima (uporaba kontaktnih leća, nakon operacije oka), pružajući dugotrajno olakšanje.

KAKO SE KORISTI?

1 kap u oko, jednom ili više puta dnevno prema potrebi.

MJERE OPREZA I UPOZORENJA

- Proizvod je namijenjen isključivo za vanjsku očnu primjenu.
- Ne koristite ukoliko je bočica oštećena.
- Ne koristite ukoliko postoji preosjetljivost na neki od sastojaka proizvoda.
- Izbjegavajte dodir kapaljke s okom.
- Ne koristite nakon datuma isteka roka valjanosti naznačenog na pakiranju.
- Nakon primjene, u rijetkim slučajevima, može doći do blagog prolaznog zamućenja vida zbog viskoznosti otopine. Zbog toga se preporučuje pričekati nekoliko sekundi prije poduzimanja bilo koje aktivnosti koja zahtijeva jasan vid.
- Pričekajte barem 10-15 minuta prije primjene bilo kojeg drugog lijeka za oči.
- Nakon prvog otvaranja bočice, proizvod se može koristiti u razdoblju od 30 dana.
- Nemojte nositi kontaktne leće tijekom ukapavanja proizvoda i nemojte ih stavljati najmanje 15 minuta.
- Meke kontaktne leće mogu apsorbirati benzalkonijev klorid zbog čega se može promijeniti njihova boja.
- Benzalkonijev klorid može uzrokovati nadražaj oka. U slučaju neuobičajenog osjećaja u oku, bockanja ili boli u oku, nakon primjene ovog proizvoda, obratite se svom liječniku.
- Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
- Čuvati na temperaturi ispod 25°C.
- Proizvod nemojte progutati.

Datum posljednje revizije teksta Siječanj 2021.



Proizvođač: Farmigea S.p.A. - Via G.B. Oliva, 6/8 – 56121, Pisa, Italija

Distributer za Republiku Hrvatsku:

Alkaloid d.o.o.

Slavonska avenija 6 A, 10 000 Zagreb



Nakon uporabe pravilno zbrinuti.

