

PROCULIN LENS/ PROCULIN LENS travel pack (putno pakiranje)

Otopina za leće

Višenamjenska otopina s hijaluronskom kiselinom. Dezinficira, čuva, čisti, hidrira, podmazuje, ispire, vlaži, uklanja naslage proteina. Za sve vrste kontaktnih leća. Pogodno za osjetljive oči. Sadrži kutiju za leće.

NAMJENA PROIZVODA

Višenamjenska otopina za dezinfekciju, čuvanje, čišćenje, vlaženje, podmazivanje, ispiranje i uklanjanje naslaga proteina za sve vrste kontaktnih leća, uključujući i leće od silikon hidrogela. Namijenjeno korisnicima s osjetljivim očima sklonima sindromu suhog oka. Uključena je kutija za leće s ionima srebra.

Zahvaljujući hijaluronskoj kiselini, proizvod podmazuje kontaktne leće, što poboljšava udobnost pri dugotrajnom nošenju.

UPUTE ZA UPORABU

Pažljivo operite i osušite ruke.

Izvadite leću, stavite je na dlan, stavite nekoliko kapi otopine i protrljajte površinu leće.

Ispirajte leću otopinom da uklonite sve ostatke.

Stavite leće u kutiju i napunite je tekućinom.

Za dezinfekciju ostavite leće u otopini najmanje 4 sata, ili još bolje tijekom cijele noći.

Lagano otresite kutiju prije nego izvadite leće.

Leće su spremne za uporabu.

Bacite iskorištenu otopinu i zatvorite kutiju za leće.

UPOZORENJA

Proizvod je sterilan do prvog otvaranja bočice; Dobro zatvorite bočicu nakon uporabe; Upotrijebite proizvod unutar 90 dana od prvog otvaranja; Proizvod ne zamrzavati i držati dalje od izvora topline; Čuvati izvan dohvata djece; Ne smije se progutati; Nemojte koristiti proizvod u slučaju preosjetljivosti na bilo koji sastojak; U slučaju štetnih događaja prekinuti korištenje i obavijestiti liječnika.

SASTAV

Izotonična sterilna otopina sa pH 7,2 sadrži: poliheksametilen bigvanid (0,0001 %), mirapol A15, natrijev edetat, metiloksiran polimer i natrijev hijaluronat.

SADRŽAJ KUTIJE

1 bočica od 400 ml ili 1 bočica od 100 ml

1 kutija za leće

Medicinski proizvod **MD**

